

SOUNDCLIP-A



Käyttöohje

bernafon 
Your hearing • Our passion

Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa, kuinka käyttää ja huoltaa uutta SoundClip-A:ta. Lukekaa käyttöohje huolella, mukaan lukien varoitukset. Näin takaatte parhaan hyödyn uudesta SoundClip-A:sta.

Otattehan yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos teillä on lisäkysymyksiä SoundClip-A:n käytöstä.

Käyttötarkoitus

SoundClip-A on tarkoitettu äänen langattomaksi vastaanottimeksi ja lähettimeksi kuulokojeiden ja ympäristön, kuten puhujan tai langattomien elektronisten äänilaitteiden välille. Lisäksi SoundClip-A avustaa langattomien kuulokojeiden käyttäjiä kuulokojeen toimintojen hallinnassa.

SoundClip-A on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä kuulokojeen kanssa, ja se soveltuu sekä aikuisille että yli 3-vuotiaille lapsille.

TÄRKEÄÄ

Tutustukaa tämän käyttöohjeen koko sisältöön ennen SoundClip-A:n käyttämistä. Käyttöohje sisältää tärkeää tietoa SoundClip-A:n käytöstä ja käsittelystä.


Johdanto

SoundClip-A:ta voidaan käyttää sekä matkapuhelimen kanssa langattomana kuulokemikrofonina että etä-/keskustelumikrofonina.

1. Matkapuhelimen kuulokemikrofoni


Puhelimesta kuuluvat äänet
suoratoistetaan

SoundClip-A:n kautta (A)
kuulokojeisiin. SoundClip-A
poimii käyttäjän oman
äänen ja lähettää sen
matkapuhelimeen (B).

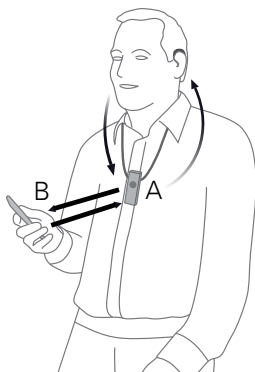

2. Etä-/keskustelumikrofoni

Valitun puhujan ääni siirretään langattomasti SoundClip-A:sta kuulokojeisiin.

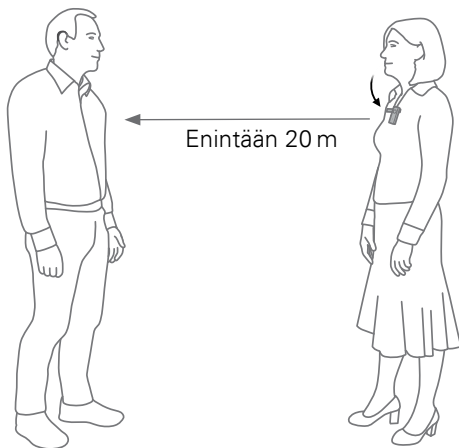

Sisällys

Pakkauksen sisältö	9
Yleiskuvaus – päätoiminnot	10
Yleiskuvaus – tuotteen merkkivalot	12
Käytön aloitus	14
Päivittäinen käyttö: virran kytkeminen/katkaisu	20
Päivittäinen käyttö: lataaminen	21
SoundClip-A:n käyttäminen matkapuhelimen kanssa	22
SoundClip-A:n ja puhelimen yhteyden varmistaminen	23
Puheluiden vastaanottaminen	24
Puheluiden soittaminen	26
Kuuloketilan lisätoiminnot	27
Musiikin kuunteleminen	28
SoundClip-A:n käyttäminen etämikrofonina	30
Etämikrofonin äänentoiston aloittaminen/lopettaminen	32
Etämikrofonin äänitason säätäminen	33
Etämikrofonin äänentoiston aloittaminen/lopettaminen kuulokojeita käyttäen	34

SoundClip-A:n käyttäminen kuulokojeiden kaukosäätimenä	35
Muut ominaisuudet ja toiminnot	36
SoundClip-A:n puhdistaminen	37
Varoitukset	38
Tekniset tiedot	44
Kansainvälinen takuu	47

Pakkauksen sisältö

SoundClip-A:n mukana toimitetaan seuraavat osat:



SoundClip-A



USB-lataus-
kaapeli



Seinälaturi (vaihtelee
maan mukaan)



Nauha – pitkä



Nauha – normaali





Säilytyskotelo




Tämä käyttöohje

Yleiskuvaus – päätoiminnot

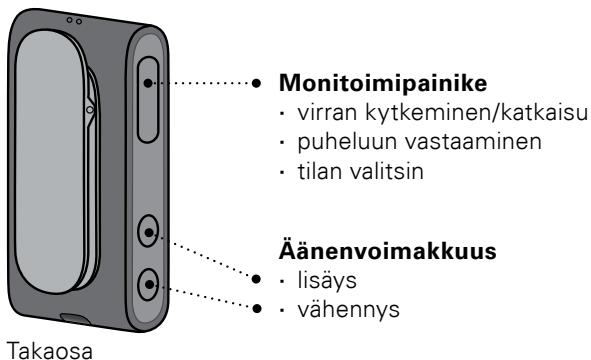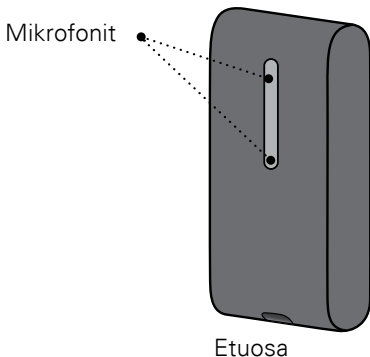


Tilan merkkivalo

Virran merkkivalo

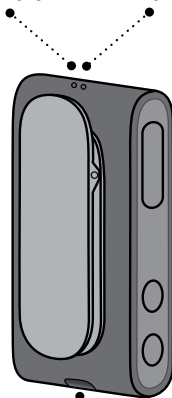

Latausliitin (micro-USB)

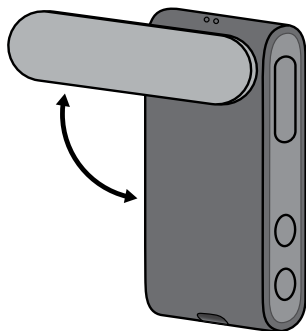

Pidike (pyörivä)
SoundClip-A:n
kiinnittämiseen

Yleiskuvaus – tuotteen merkkivalot


Tila	Kuvaus	
	Vilkkuva keltainen	Etsii kuulokojeita
	Yhtenäinen keltainen	Vapaa. Kuulokojeet yhdistetty, ei yhteyttä puhelimeen.
	Vilkkuva sininen	Etsii matkapuhelinta (pariliitännän muodostus)
	Yhtenäinen sininen	Yhdistetty matkapuhelimeen
	Yhtenäinen vihreä	Puhelu käynnissä
	Vilkkuva vihreä	Saapuva puhelu
	Yhtenäinen oranssi	Suoratoistaa musiikkia
	Yhtenäinen magenta	Etämikrofonitila
	Vilkkuva magenta	Yhdistää uudelleen etämikrofoniin

Virta	Kuvaus	
	Yhtenäinen punainen	Akun virta vähissä
	Jatkuva vihreä	Virta kytketty – ei lataa
	Vilkkuva vihreä	Virta kytketty – lataa
	Himmenevä vihreä	Virta kytketty – lataus valmis
	Vilkkuva oranssi	Virta katkaistu – lataa
	Jatkuva oranssi	Virta katkaistu – lataus valmis

Käytön aloitus


Ennen kuin SoundClip-A:ta voidaan käyttää kuulokojeiden kanssa, molemmat kuulokojeet ja SoundClip-A on yhdistettävä laitepareiksi. SoundClip-A:n käyttäminen matkapuhelimen kanssa edellyttää, että SoundClip-A yhdistetään myös matkapuhelimen laitepariksi.

A. Kuulokojeiden ja SoundClip-A:n pariliitäntä

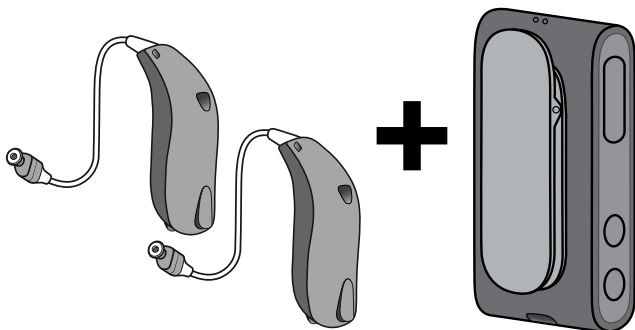

**Sivulla 16 on tarkemmat ohjeet
SoundClip-A:n ja kuulokojeiden
pariliitäntään**

B. SoundClip-A:n ja matkapuhelimen pariliitäntä

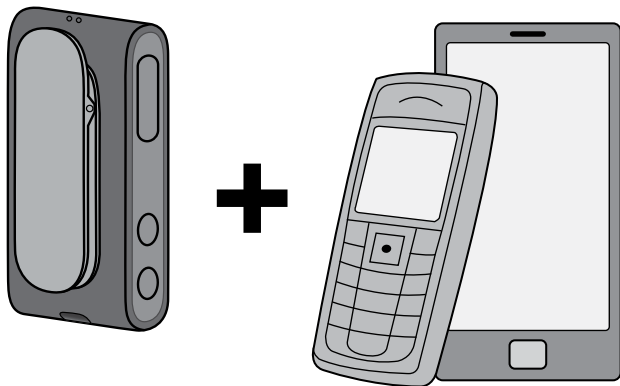


**Sivulla 18 on tarkemmat ohjeet
SoundClip-A:n ja matkapuhelimen
pariliitäntään**

A. Kuulokojeiden ja SoundClip-A:n pariliitäntä

1. Varmistakaa, että


SoundClip-A on sammutettu

Painakaa monitoimipainiketta noin 6 sekunnin ajan, kunnes virran merkkivalo **SAMMUU** ●.

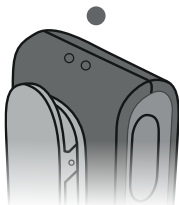

2. Katkaiskaa virta molemmista kuulokojeista

(avatkaa paristokotelo)

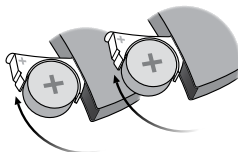


3. Kytkekää virta molempiin kuulokojeisiin

(sulkekaa paristokotelo)

Kuulokojeet ovat nyt valmiina muodostamaan yhteyden ensimmäistä kertaa SoundClip-A:han.


Pariliitäntä täytyy tehdä 3 minuutin sisällä.

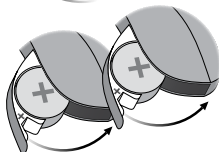

4. Kytkekää virta


SoundClip-A- laitteeseen

Painakaa monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes virran merkkivalo palaa **YHTENÄISESTI VIHREÄNÄ** ●.

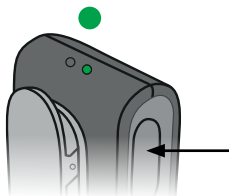


5. SoundClip-A etsii nyt kuulokojeita

Tilan merkkivalo **VILKKUU Keltaisena** 🟡.

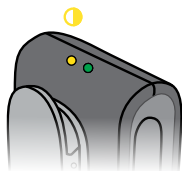

6. Asettakaa SoundClip-A ja molemmat kuulokojeet lähekkäin

(enimmäisetäisyys 20 cm)

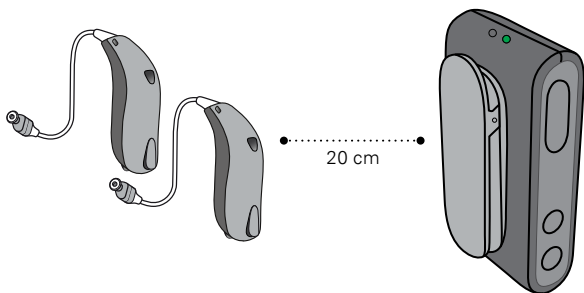

7. Kun yhteys kuulokojeisiin on muodostettu,

tilan merkkivalo palaa **YHTENÄISESTI Keltaisena** 🟡.




B. Matkapuhelimen ja SoundClip-A:n pariliitäntä

1. Asettakaa SoundClip-A pariliitännätilaan

Painakaa monitoimipainiketta JA äänenvoimakkuuden säätöpainiketta noin 6 sekuntia (A), kunnes tilan merkkivalo **VILKKUU SINISENÄ** .

2. SoundClip-A on pariliitännätilassa noin 3 minuutin ajan

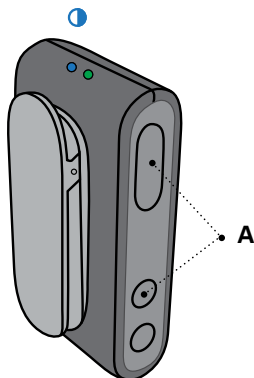


3. Muodostakaa pariliitântä matkapuhelimessa

Kytkekää Bluetooth® käyttöön. Etsikää SoundClip-A ja muodostakaa pariliitântä.

Tämä tehdään tavallisesti puhelimen kohdassa asetukset → Bluetooth®.


4. Laittakaa PIN-koodi

Jos puhelin pyytää PIN-koodia, laittakaa 0000 (neljä nollaa).

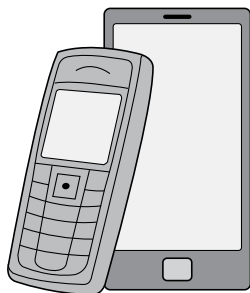


5. Pariliitântä valmis

Kun pariliitântä matkapuhelimeen on valmis, tilan merkkivalo palaa YHTENÄISESTI SINISENÄ ●.

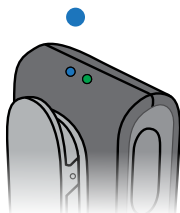


Päivittäinen käyttö: virran kytkeminen/ katkaisu

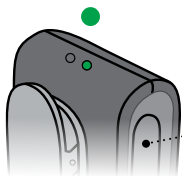

Päälle

Painakaa monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan, kunnes virran merkkivalo palaa

YHTENÄISESTI VIHREÄNÄ ●

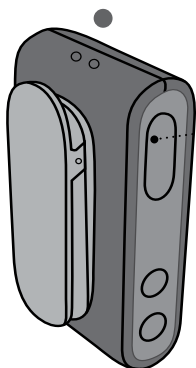

Pois päältä

Painakaa monitoimipainiketta noin 6 sekuntia, kunnes virran merkkivalo **SAMMUU** ●.

Päivittäinen käyttö: lataaminen




• Akun virta vähissä

Kun suoratoisto-aikaa on jäljellä noin 30 minuuttia, virran merkkivalo muuttuu **PUNAISEKSI** ●.





Lataaminen

- Kytkekää mukana toimitettu laturi SoundClip-A:n pohjassa olevaan micro-USB -liittimeen. Virran merkkivalo **VILKKUU VIHREÄNÄ** ● tai **ORANSSINA** ●.

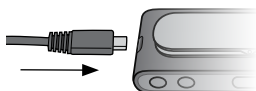

Lataamisen merkkivalot			Tila
●	Vilkkuu	Lataa	SoundClip-A päällä
●	Himmenevä	Lataaminen valmis	
●	Vilkkuu	Lataa	SoundClip-A pois päältä
●	Jatkuva	Lataaminen valmis	


SoundClip-A:n käyttäminen matkapuhelimen kanssa

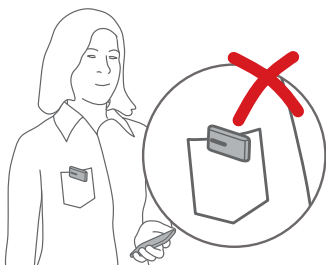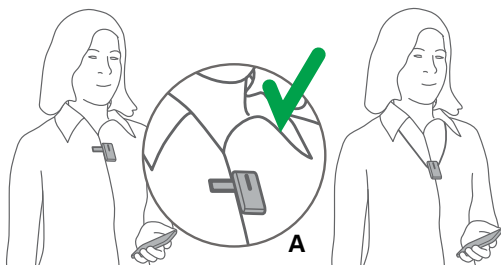

TÄRKEÄÄ

SoundClip-A toimii parhaiten, kun sitä pidetään kuvan osoittamalla tavalla. On tärkeää, että SoundClip-A:n mikrofoni osoittaa kohti suuta (A) ja etteivät vaatteet tms. peitä SoundClip-A:ta. Enimmäisetäisyys SoundClip-A:n ja matkapuhelimen välillä on 10 metriä.

SoundClip-A:n ja puhelimen yhteyden varmistaminen

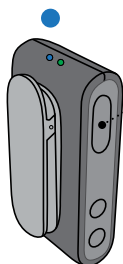

Valitkaa puhelintila

Vaihtakaa tilaa painamalla monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan. Tilan vaihto vahvistetaan kuulokojeista kuuluvalla äänimerkillä.


Tilan merkkivalo on

YHTENÄINEN SININEN ●.



Tila	Kuvaus
●	SoundClip-A on vapaa eli sitä ei ole yhdistetty matkapuhelimeen. Yhdistetty kuulokojeisiin.
●	Yhdistetty matkapuhelimeen
●	SoundClip-A on etä-/keskustelumikrofonitilassa


Puheluiden vastaanottaminen

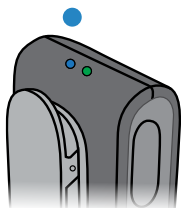

Puhelin yhdistetty

Kun SoundClip-A:han kytketään virta ja se on matkapuhelimen alueella, se yhdistetään automaattisesti matkapuhelimeen.

Tilan merkkivalo palaa
YHTENÄISESTI SINISENÄ ●.

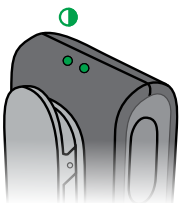


Puhelin soi

Kun puhelin soi, kuulette soiton merkkiäänä ja, jos käytettävissä, puhelimenne soittoäänä kuulokojeissa .



Tilan merkkivalo
VILKKUU VIHREÄNÄ ●.

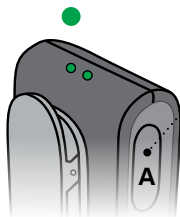


Puheluun vastaaminen

Painakaa monitoimipainiketta (A) lyhyesti – tai vastatkaa puheluun matkapuhelimesta.

Kun puhelu yhdistetään, tilan merkkivaloksi muuttuu

YHTENÄISEKSI

VIHREÄKSI ●.

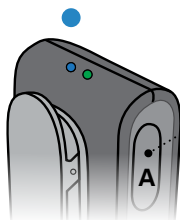

Puhelun lopettaminen


Painakaa monitoimipainiketta (A) lyhyesti – tai katkaiskaa puhelu matkapuhelimesta.

Tilan merkkivalo on

YHTENÄINEN SININEN ●.

Puheluiden soittaminen

Puhelun soittamiseen tarvitaan vain matkapuhelinta. Puhelu yhdistetään automaattisesti SoundClip-A:han.

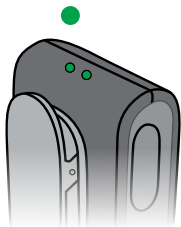

Kun puhelu yhdistetään,
tilan merkkivalo muuttuu
YHTENÄISEKSI VIHREÄKSI ●.

Kuuloketilan lisätoiminnot

Numeronvalinta äänellä / äänikomennot

Kun matkapuhelin on yhdistetty, monitoimipainikkeen painaminen kahdesti aktivoi numeronvalinnan äänellä, jos puhelin tukee toimintoa.

Puhelun hylkääminen

Äänenvoimakkuuden vähennyspainikkeen pitkä painallus puhelimen soidessa hylkää puhelun.

Kuulokojeiden mikrofonien vaimennus

Kuulokojeiden mikrofonit voidaan vaimentaa painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta noin 3 sekunnin ajan.

Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainikkeen lyhyt painallus poistaa vaimennuksen.


Musiikin kuunteleminen

Langaton ääni (A2DP)

Kun matkapuhelin tai jokin muu laite on yhdistetty Bluetoothin® kautta, puhelimessa/laitteessa soittettava musiikki toistetaan automaattisesti kuulokojeista.

Tilan merkkivalo on **YHTENÄINEN ORANSSI** ●.


SoundClip-A:ssa ei tarvitse tehdä mitään.

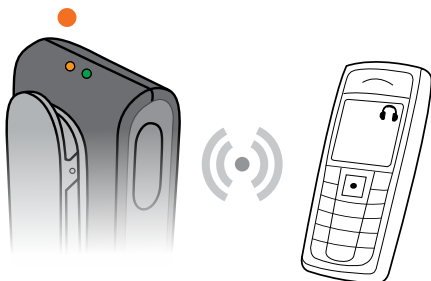

Tila	Kuvaus
●	SoundClip-A suoratoistaa musiikkia puhelimesta

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kuunneltaessa musiikkia suoratoistettavan äänen voimakkuutta voidaan säätää äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla.

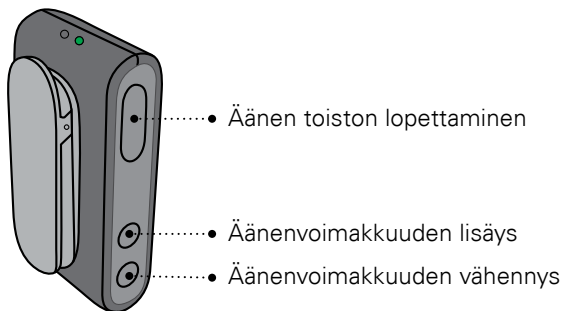


Puhelimen äänentoiston lopettaminen

Monitoimipainikkeen lyhyt painallus lopettaa äänentoiston. Äänentoisto aloitetaan puhelimesta käsin.

SoundClip-A:n käyttäminen etämikrofonina

Etämikrofoni


Tässä tilassa SoundClip-A:ta pitävän henkilön puhe suoraan toistetaan kuulokojeisiin.

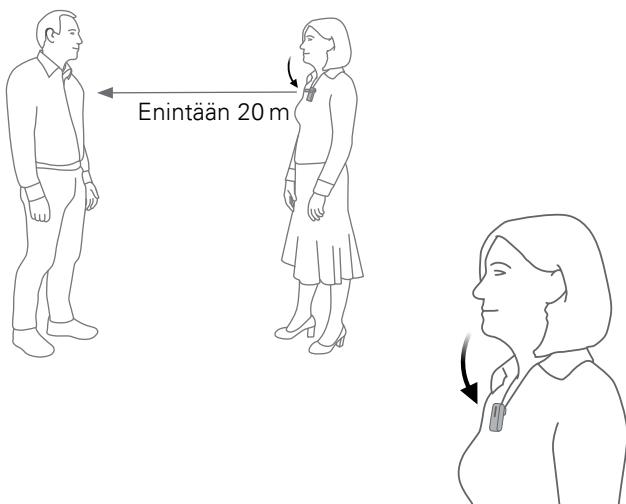

TÄRKEÄÄ

Mikrofonin on oltava kohti puhujan suuta, eikä se saa jäädä vaatteiden tms. peittoon.

Mikrofonitilan valitseminen

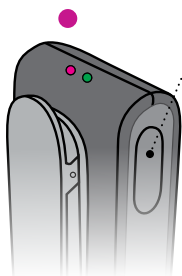

- **Valitkaa mikrofonitila**

Tilaa vaihdetaan painamalla monitoimipainiketta noin 3 sekunnin ajan.


Tilan vaihtuminen vahvistetaan kuulokojeista kuuluvalla äänimerkillä.



Tilan merkkivalo on
YHTENÄINEN MAGENTA ●.

Tila	Kuvaus
●	SoundClip-A on vapaa eli sitä ei ole yhdistetty matkapuhelimeen. Yhdistetty kuulokojeisiin.
●	Yhdistetty matkapuhelimeen
●	SoundClip-A on etä-/keskustelumikrofonitilassa

Etämikrofonin äänentoiston aloittaminen/lopettaminen

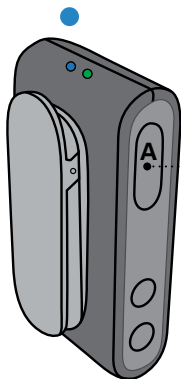

- **Mikrofonin äänentoiston
lopettaminen**


Äänentoisto mikrofonista kuulokojeisiin lopetetaan painamalla monitoimipainiketta (A) noin 3 sekunnin ajan, jolloin kuulokojeet palaavat takaisin normaaliin ohjelmaansa.

Tilan merkkivaloksi muuttuu
YHTENÄINEN KELTAINEN ●
tai **YHTENÄINEN SININEN** ●.

Etämikrofonin äänitason säätäminen

Äänenvoimakkuuden lisääminen tai vähentäminen

Suoratoistettavaa signaalia voidaan säätää äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla.

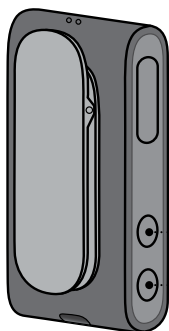

• Äänenvoimakkuuden lisäys

• Äänenvoimakkuuden vähennys

Kuulokojeiden mikrofoniin vaimennus (vain etämikrofonin ääni)

Kuulokojeiden mikrofoniin vaimennetaan painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta noin 3 sekunnin ajan.


Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainikkeen lyhyt painallus palauttaa äänet.

Etämikrofonin äänentoiston aloittaminen/ lopettaminen kuulokojeita käyttäen

P1 -> P2 -> TV -> Mikrofoni

Kuulokojeen painikkeen painaminen vaihtaa seuraavaan ohjelmaan kuulokojeissa.

Kun pääsette etämikrofoniohjelmaan, kuulette kuulokojeista etämikrofoniohjelman merkkiäänen.

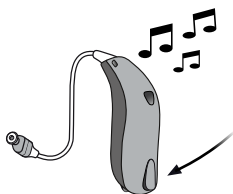


Voitte lopettaa äänentoiston etämikrofonista vaihtamalla takaisin haluttuun kuulokojeohjelmaan.

TÄRKEÄÄ

Tutustukaa kuulokojeenne käyttöohjeeseen, joka antaa yksityiskohtaista tietoa käytössänne olevan kuulokojeen toiminnoista.

SoundClip-A:n käyttäminen kuulokojeiden kaukosäätimenä

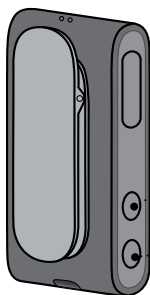


Kun SoundClip-A ei suoratoista ääntä, sitä voidaan käyttää kuulokojeiden kaukosäätimenä.

- **Äänenvoimakkuuden lisäys**

- Lyhyt painallus

- **Äänenvoimakkuuden vähennys**

- Lyhyt painallus

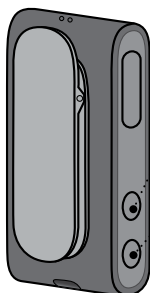

- **Seuraava ohjelma**

- 3 sekunnin painallus siirtää seuraavan ohjelmaan

- **Kuulokojeiden mikrofonien vaimennus – pitkä painallus**

- Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainikkeen lyhyt painallus poistaa vaimennuksen

TÄRKEÄÄ

SoundClip-A:n ja kuulokojeiden enimmäisetäisyys on 2 metriä.

Muut ominaisuudet ja toiminnot

Yksi yhteys kerrallaan

Kun SoundClip-A on liitetty pariksi usean (enintään 8) laitteen kanssa, se muodostaa yhteyden vain ensimmäiseen käytettävissä / kantaman sisällä olevaan puhelimeen.

Ei puheluita mikrofonitilassa

Kun SoundClip-A:ta käytetään etä-/keskustelu-mikrofonina, sillä ei ole yhteyttä matkapuhelimeen.

Aikakatkaus (kantaman ulkopuolella) mikrofonitilassa

Jos SoundClip-A on kuulokojeiden kantaman ulkopuolella, kuulokojeet palaavat aloitusohjelmaan 90 sekunnin kuluttua.

Bluetooth®-pariliitäntöjen poistaminen

Bluetooth®-pariliitännät voidaan poistaa painamalla monitoimipainiketta, äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta 10 sekunnin ajan. Kun poisto on valmis, tilan merkkivalo **VILKKUU PUNAISENA** .

SoundClip-A:n puhdistaminen

SoundClip-A puhdistetaan pehmeällä, kuivalla liinalla. Sitä ei saa koskaan pestä vedellä tai muilla nesteillä eikä upottaa nesteeseen.

Varoitukset

Oman turvallisuutenne ja oikean käyttötavan varmistamiseksi kehotamme tutustumaan seuraaviin yleisiin varoituksiin sekä lukemaan huolellisesti läpi koko tämän käyttöohjeen, ennen kuin käytätte SoundClip-A:ta. Jos SoundClip-A toimii odottamattomalla tavalla, ottakaa yhteyttä kuuloalan asiantuntijaan.

Tukehtumisvaara ja muiden pienten osien nielemisvaara

SoundClip-A ja sen osat on säilytettävä lasten ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa itseään niillä. Osan nieläisseen täytyy mennä lääkäriin välittömästi.

Tulenarkuus

SoundClip-A:n virtalähde on riittämätön energianlähde aiheuttamaan tulipaloa normaaleissa käyttöolosuhteissa. SoundClip-A:ta ei ole testattu räjähtäviä kaasuja koskevien kansainvälisten standardien osalta. SoundClip-A:n käyttö ei ole suositeltavaa paikoissa, joissa on räjähdysvaara.

Röntgen-, TT-, magneetti- tai PET-kuvaus, sähköhoito ja leikkaukset

SoundClip-A:ta ei saa viedä röntgen-, TT-, magneetti- tai PET-kuvaukseen, sähköhoitoon, leikkaukseen yms., koska voimakkaat kentät voivat vaurioittaa SoundClip-A:ta.

Kuumuus ja kemikaalit

SoundClip-A:ta ei saa altistaa kovalle kuumuudelle esimerkiksi jättämällä sitä aurinkoiselle paikalle pysäköityyn autoon. SoundClip-A:ta ei saa kuivata mikroaaltouunissa tai muissa uuneissa. Kosmetiikkatuotteiden, hiuskiinteen, hajuveden, after shave -tuotteiden, aurinkorasvan ja hyönteiskarkotteen sisältämät kemikaalit saattavat vahingoittaa SoundClip-A:ta. Irrottakaa SoundClip-A aina ennen näiden tuotteiden käyttöä ja antakaa aineiden kuivua ensin.

Häiriöt

SoundClip-A:n häiriönsietokyky on tutkittu huolellisesti tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan. Tästä huolimatta jotkin laitteet, kuten matkapuhelimet, kauppojen hälytyslaitteet ja muut langattomat laitteet, saattavat aiheuttaa häiriötä SoundClip-A:ssa. Mikäli havaitsette häiriötä, siirrykää kauemmaksi niitä aiheuttavasta laitteesta.

Varoitukset

Käyttö liikenteessä

SoundClip-A:n käyttäminen voi häiritä keskittymistä. Pysykää tietoisena ympäristöstä SoundClip-A:ta käytettäessä. Lisätietoa viestintälaitteiden käytöstä liikenteessä on kansallisissa liikennelaeissa.

Käyttö lentokoneissa

SoundClip-A sisältää Bluetooth®-tekniikkaa. SoundClip-A:ta ei saa käyttää lentokoneessa, ellei siihen ole saatu erityistä lupaa lentohenkilöstöltä.

Aktiiviset implantit

Olkaa erityisen varovainen, jos teille on asennettu aktiivinen implantti. Jos teille on asennettu aktiivinen aivoimplantti, ottakaa yhteys sen valmistajaan ja pyytäkää tietoja implantin mahdollisista häiriötekijöistä.

Ladattava paristo

SoundClip-A:ta ei saa yrittää avata, sillä sen paristo voi vahingoittua.

Akkua ei saa yrittää vaihtaa. Jos akku täytyy vaihtaa, palauttakaa laite hankintapaikkaan. Huolto-takuu mitätöityy, jos laite on avattu tai yritetty avata.

Akkujen lataamisen turvallisuus USB-liitintä käyttäen määräytyy ulkoisen laitteiston perusteella. Kun USB-liitin yhdistetään verkkovirtaan kytkettyyn laitteeseen, tämän laitteen tulee olla UL-hyväksytty tai täyttää IEC-60065-, IEC-60950- tai vastaavan standardin vaatimukset.

KytKentä ulkoisiin laitteisiin

Ulkoiseen laitteeseen kytkettynä SoundClip-A:n käytön turvallisuus määräytyy siihen (aux-tulokaapelilla, USB-kaapelilla tai suoraan) kytketyn ulkoisen laitteen mukaan. Kun SoundClip-A liitetään verkkovirtaan kytkettyyn laitteeseen, tämän laitteen tulee täyttää IEC-60065-, IEC-60950- tai vastaavan standardin vaatimukset.

Varoitukset

Säilytys

SoundClip-A tulee säilyttää lasten tai muiden laitetta ehkä varomattomasti käsittelevien ulottumattomissa, jotta vältetään virheellinen käyttö ja varmistetaan henkilökohtainen turvallisuus.

Nauhan käyttö

Jos nauha käytettäessä tarttuu vahingossa johonkin, se on suunniteltu katkeamaan automaattisesti. Nauhaa ei tämän vuoksi saa koskaan yrittää lyhentää tai muuttaa luvatta. Alle 3-vuotiaat lapset eivät saa käyttää nauhaa.

Mahdolliset haittavaikutukset

SoundClip-A on valmistettu materiaaleista, jotka eivät tavallisesti aiheuta allergiaa, mutta joissakin harvinaisissa tapauksissa ne saattavat aiheuttaa ihoärsytystä tai muita haittavaikutuksia. Neuvotkaa tällaisessa tapauksessa lääkärin kanssa.

Matkapuhelinten yhteensopivuus

Osoitteesta

www.bernafon.com/products/accessories

löytyy luettelo matkapuhelimista, jotka Bernafon on testannut kattavasti ja joiden on todettu täyttävän yhteensopivuuden vähimmäisvaatimukset testaushetkellä. Bernafon ei kuitenkaan ole vastuussa yhteensopivuudesta. Erityisesti Bernafon ei ole vastuussa yhteensopimattomuudesta, joka johtuu matkapuhelinten myöhemmistä päivityksistä, eikä yhteensopimattomuuksista, joita ei tutkittu ja/tai havaittu näissä testeissä. Bernafon ei ole velvollinen maksamaan korvauksia matkapuhelimista, jotka eivät toimi odotetulla tavalla. On suositeltavaa tutustua yllä mainittuun luetteloon ennen uuden matkapuhelimen ostamista.

Tekniset tiedot

Käyttöolosuhteet

Käyttökosteus: 15–93 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön.

Käyttölämpötila: 5...40 °C

Säilytys- ja kuljetus: –20...60 °C

SoundClip-A:ssa on radiolähetin, joka käyttää Bluetooth® EDR-, Bluetooth® Low Energy (BLE)- ja soveltuvaa lyhyen kantaman radioteknologiaa, jotka kaikki toimivat taajuudella 2,4 GHz. 2,4 GHz:n radiolähettimen kokonaissäteilyteho on heikko ja aina alle 17 dBm EIRP.

SoundClip-A noudattaa radiolähettämiä, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja ihmisten altistumista koskevia kansainvälisiä standardeja.

SoundClip-A:n koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä käyttöohjeessa.

USA and Canada

The device contains a radio module with the following certification ID numbers:

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

The device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the manufacturer or an experienced radio/TV technician for help.

Kansainvälinen takuu

SoundClip-A:lla on valmistajan myöntämä rajoitettu 12 kuukauden takuu, joka alkaa laitteen ostopäivästä. Tämä rajoitettu takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat itse laitteessa, muttei siihen liittyvissä lisälaitteissa, kuten paristoissa, johdoissa, virtalähteissä jne. Ongelmat, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai muun kuin maahantuojan suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, vieraiden esineiden joutumisesta kojeeseen tai vääristä säädöistä, EIVÄT kuulu takuun piiriin ja saattavat poistaa takuuvastuun kokonaan. Tämä takuu ei vaikuta kansalliseen lainsäädäntöön perustuviin laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden kauppaa. Laitteen myyjä on saattanut myöntää laitteelle tässä kuvattua rajoitettua takuuta kattavamman takuun. Pyytäkää lisätietoja myyjältä.

Jos laite tarvitsee huoltoa

Ottakaa yhteyttä ensin SoundClip-A:n hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Päiväys: _____ Malli: _____

Takuuaika: _____

Sarjanro: _____

Kuulokeskus

Valmistaja vakuuttaa, että tämä SoundClip-A (AC1A) on yhteensopiva direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa. Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska
www.sbohearing.com



Elektroniikkajäte on
käsiteltävä paikallisen
lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.



[illegible]

< >
8,15 mm

Placeholder
for FSC logo

FSC
MIX
Paper
FSC® C043970

19 mm

9,0 mm

< 15 mm >



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska
www.sbohearing.com



0000188187000001

bernafon 
Your hearing • Our passion